

## MULTI-GYN VAGINAL DOUCHE - PENTRU O IGIENĂ VAGINALĂ OPTIMĂ

- Curățare eficientă și delicată
- Valva specială face imposibil refluxul lichidului, reduce presiunea și creează un efect de spălare ideal
- Dispozitiv de spălat ergonomic, care poate fi folosit în diferite poziții

## INDICAȚII

Irigatorul Multi-Gyn și tabletele de curățare sunt indicate pentru igiena vaginală generală sau pentru igiena vaginală intensivă în cazul secrețiilor vaginale excesive, cu miros neplăcut, mâncărimi, iritații și senzație de arsură.

## MOD DE UTILIZARE

Unele femei sunt mai susceptibile la disconfort vaginal decât altele datorită stilului de viață, activității sexuale sau menstruației. În funcție de necesitățile de igienă personală, Multi-Gyn Vaginal Douche poate fi folosit mai frecvent; cu toate acestea, nu este recomandat să utilizați Multi-Gyn Vaginal Douche mai mult de 3 ori pe săptămână cu excepția cazului în care medicul recomandă altfel.


Consultați medicul atunci când disconfortul vaginal sau simptomele persistă. Multi-Gyn Vaginal Douche poate fi folosit în diferite poziții. Găsiți-vă modul cel mai confortabil de a utiliza Multi-Gyn Vaginal Douche. De exemplu: pe toaletă sau sub duș. Este important ca lichidul de curățare să se elimine singur în timpul spălării. Vă rugăm să consultați instrucțiunile ilustrate de utilizare a Multi-Gyn Vaginal Douche de mai jos.

## MULTI-GYN VAGINAL DOUCHE ÎN SARCINĂ

Dacă doriți să rămâneți gravidă, vă sfătuim să nu folosiți Multi-Gyn Vaginal Douche până la 3 zile după contactul sexual. Multi-Gyn Vaginal Douche nu este un contraceptiv. Nu există contraindicații cunoscute privind utilizarea tabletelor Multi-Gyn sau a irigatorului Multi-Gyn în timpul sarcinii sau alăptării. Cu toate acestea, recomandăm întotdeauna să contactați medicul dacă sunteți gravidă.

## VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI!

Irigatorul Multi-Gyn Vaginal Douche nu trebuie fiert sau introdus în apă fierbinte, deoarece se va deforma iremediabil.

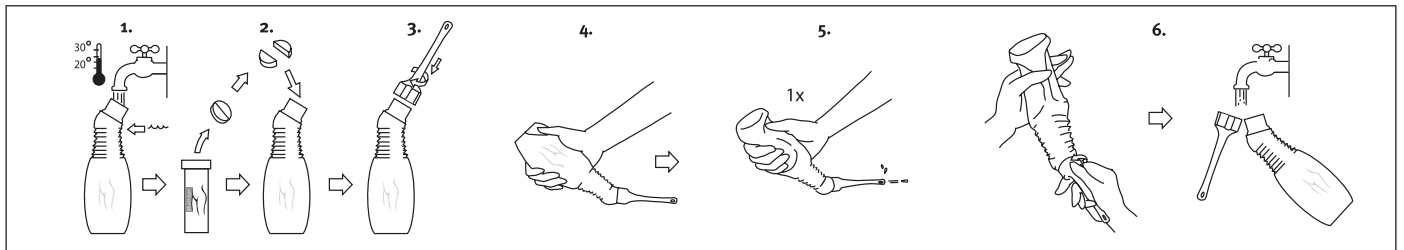

1. Umpleți Multi-Gyn Vaginal Douche cu apă caldă până la partea superioară a nervurilor
2. Rupeți un comprimat Multi-Gyn și adăugați-l în apă
3. Înșurubați aplicatorul pe flacon și așteptați până când comprimatul Multi-Gyn se dizolvă complet

4. Introduceți cu blândețe aplicatorul în vagin într-o poziție cât mai confortabilă
5. Strângeți flaconul pentru a curăța vaginul cu lichidul de spălare. Este normal ca o parte din lichid să rămână în flacon \*. Nu este necesar să goliți flaconul

6. Separați aplicatorul de flacon și clătiți-le bine cu apă caldă. Lăsați să se usuce în mod natural (de preferință într-un loc uscat)

\* Cantitatea de lichid este suficientă pentru curățarea vaginului. Dacă doriți să curățați din nou cu lichidul rămas, deșurubați aplicatorul de pe flacon, astfel încât acesta să revină la forma inițială, înșurubați aplicatorul pe flacon și apoi reluați de la pasul 4.

# Multi-Gyn® Tablets

## TABLETELE MULTI-GYN CREEAZĂ UN FLUID DE CURĂȚARE NATURAL ȘI DELICAT PENTRU IGIENA VAGINALĂ OPTIMĂ.

- 1 tabletă este suficientă pentru o spălare cu irigatorul Multi-Gyn
- Conține ingrediente naturale, fără conservanți sau parfum
- Folosite cu irigatorul Multi-Gyn, tabletele efervescente oferă o igienă vaginală optimă

## TABLETE PENTRU IGIENA VAGINALĂ CU INGREDIENTE NATURALE

Tabletele Multi-Gyn, dizolvate în apă caldă, creează un fluid de curățare natural și delicat pentru utilizarea împreună cu irigatorul Multi-Gyn. Tabletele concentrate efervescente conțin ingrediente naturale.

## INGREDIENTE

Lactose, Citric Acid, Sodium Bicarbonate, Lactic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Polysaccharides, Ascorbic Acid.

## Ingredient activ principal pulbere complex 2QR:

Polizaharide bioactive patentate purificate din extract de frunze de Aloe Barbadensis

Tabletele au un aspect granular și pot varia puțin în culoare. Aceste variații minore se referă la proprietățile naturale ale principalului ingredient activ, complexul-2QR. Acestea nu afectează eficacitatea sau siguranța produsului.

## DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și la îndemâna copiilor.

Tabletele se păstrează în tubul original, la loc uscat, la temperaturi între 10°C și 25°C.

## Importator și distribuitor:

S.C. VAVIAN PHARMA SRL,  
Bd. Basarabia nr. 256 corp 10, Incinta Faur, București, sector 3,  
Tel/fax: 031/0304763; 031/0304766; office@vavianpharma.ro

BioClin BV, Delftechpark 55,  
2628 XJ Delft, The Netherlands